

Ország specifikus vércukorszintmérő készülék típusok és gyártói lista

Ország: Magyarország (Hungary)

Fontos információk

Ez nem egy teljes körű lista, az adatok a 2017. májusi állapotot tükrözik. Egy speciális vércukorszintmérő készülék vagy tesztsík hiánya a listában nem jelenti azt, hogy az EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló (PD) oldattal kompatibilis vagy sem. Hasonlóan, más glükózsztintmérő technológiák (mint a folyamatos glükózsztintmérő rendszerek), melyek alább nem szerepelnek, nem biztos, hogy használhatóak az EXTRANEAL készítménnyel. **A friss információkért mindig keresse meg az eszköz gyártóját.** Amennyiben az eszköz gyártójának nincsenek információi az eszköz EXTRANEAL gyógyszerrel és maltózzal való kompatibilitásáról, ebben az esetben a Baxter nem javasolja, hogy az Extraneal kezeléson lévő betegek használják az eszközt. A Baxter fenntartja az alábbi lista bejelentés nélküli változtatásának jogát és nem állítja, hogy tartalmazza az összes potenciálisan nem használható (nem kompatibilis) eszközt.

A felsorolt vércukorszintmérő készülék gyártók igazolták a Baxter felé, hogy vércukorszintmérő készülékeiket bevizsgálták (2013 ISO 15197 szerint) maltózra és ikodextrinre a Baxter által javasolt határértékeknek megfelelően, mely határérték a maltózra 278 mg/dl, az ikodextrinre pedig 1094 mg/dl. A gyártók igazolták, hogy az alább zöld színnel feltüntetett készülékek vércukorszint mérésakor nem mutattak interferenciát ilyen körülmények mellett, kivéve a kifejezetten megjelölt "zöld" készülékeket "4", melyekre még nem érkezett a Baxter által javasolt határértékeknek megfelelő vizsgálati igazolás. Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbi kompatibilitási lista arra az esetre vonatkozik, amikor adott márkanévű vércukorszintmérő készüléket a megfelelő márkanévű tesztsíkkal használták. Amennyiben egy adott márkanévű vércukorszintmérő készüléket egy másik gyártó tesztsíkjával használ, **kérjük, hogy a friss információkért mindig vegye fel a kapcsolatot a tesztsík gyártójával.**

Ez a lista a következő forrásokból származik: internet, szakirodalom, Baxter belső vizsgálatok, kormányzati irodák információi, tesztsíkok használati utasításai, biztonsági figyelmeztetések és közvetlenül a gyártóktól kapott információk. A tájékoztató pontos és aktuális információk közlésére törekszik, azonban nem garantálja az információk helyességét, mivel nem a Baxter gyártja a vércukorszintmérő készülékeket és tesztsíkokat. Az EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldattal való kezelés során történő vércukormérés előtt a legfrissebb információkért keresse fel a vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok gyártóját.

1. Az EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldat ikodextrint tartalmaz. A maltóz, az ikodextrin metabolitja befolyásolja a vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok működését, melynek eredményeként vércukorszint méréskor tévesen magas érték jelentkezik.
2. A helytelen mérési eredmények elfedhetik a valódi hipoglikémiát, vagy téves hiperglikémia diagnózishoz vezethetnek. Azon betegeknél, akik vércukorszintjét ilyen készülékekkel olvassák le és EXTRANEAL (Ikodextrin) kezelésben részesülnek a normál és az afölötti tartományban elfedheti az alacsony vércukorszintet. Ennek következtében előfordulhat, hogy a beteg, vagy az egészségügyi szakember nem teszi meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a vércukorszintet a normál tartományba emelje. Vagy a leolvasott, tévesen magas vércukorszint következtében előfordulhat, hogy a beteg a szükségesnél több inzulint kap. Mindkét eset életveszélyes állapotokhoz vezethet, úgymint eszméletvesztés, kóma, neurológiai károsodások vagy halál.
3. A dialízist végző személyzet vagy a beteg keresse fel a vércukorszintmérő készülékek és/vagy a tesztsíkok gyártóját, hogy meggyőződjön arról, biztosan glükózsztintspecifikus-e a használandó készülék, így nem zavarja az ikodextrin és a maltóz a meghatározást. A vércukorszintmérő készülékekhez és tesztsíkokhoz mellékelt termék ismertetőt is olvassa el.
4. Az alábbi lista csak tájékoztató jellegű. Nem tartalmaz ajánlást egyik vércukorszintmérő készülékre vagy tesztsíkra sem.
5. Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a készülékek specifikusak-e glükózzra. **CSAK glükózsztintspecifikus készülékekkel és tesztsíkokkal mérjen vércukorszintet EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldattal kezelt betegeknél.** Ellenőrizze a gyártónál, hogy a tesztsíkok és a készülék glükózsztintspecifikus-e. A táblázat információval szolgál a leggyakoribb vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok gyártóiról.

Irodalomjegyzék:

^A Baxter Interim I tanulmány 33541, Az Ikdextrin és metabolitjainak zavaró hatása vércukorszint mérésekor glucometer készülék használata esetén.

Olvassa el az EXTRANEAL (Ikdextrin) peritoneális dializáló oldat részletes alkalmazási előírását.

A Baxter és az EXTRANEAL a Baxter International Inc. védjegyzett márkanamevei.

Az itt feltüntetett minden egyéb védjegy a megfelelő gyártó saját tulajdona.