

Liste des lecteurs de glycémie par nom de marque et par fabricant

Nom du pays : France

Information Importante :

Le présent document est une liste non exhaustive mise à jour en juillet 2019. L'absence d'un lecteur de glycémie ou de bandelettes réactives dans cette liste n'implique PAS sa compatibilité ou incompatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine). De la même façon, d'autres systèmes de mesure du glucose non listés dans ce document (comme les systèmes de surveillance continue de la glycémie) pourraient être ou pas compatibles avec Extraneal. **Le fabricant du système de contrôle de la glycémie doit toujours être contacté pour obtenir une information actualisée.** Si le fabricant du système de contrôle n'est pas en mesure de vous donner les informations concernant la compatibilité du dispositif concerné avec l'icodextrine et le maltose, Baxter recommande de ne PAS utiliser ce produit avec les patients sous Extraneal. Baxter se réserve le droit de modifier cette liste à tout moment sans préavis.

Cette liste est le résultat d'une recherche selon diverses sources d'information : Internet, littérature, études internes à Baxter, informations des autorités, notices des bandelettes réactives, alertes de sécurité et informations directes obtenues auprès des fabricants des lecteurs de glycémie. Malgré les actions faites pour fournir des informations précises et actualisées, Baxter ne fabrique pas de bandelettes réactives pour les lecteurs de glycémie et ne peut donc pas garantir l'exactitude de cette information à l'origine et au cours du temps. Veuillez entrer en contact avec les fabricants des bandelettes réactives des lecteurs de glycémie pour obtenir l'information la plus récente sur la compatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine).

1. La solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine) contient de l'icodextrine. Le maltose, un métabolite de l'icodextrine, peut interférer avec certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives. Cette interférence aura comme conséquence une lecture faussement élevée de la glycémie en utilisant certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives.
2. Cette interférence peut masquer une véritable hypoglycémie ou conduire à un diagnostic erroné d'une hyperglycémie. Ainsi, une lecture de glycémie égale ou supérieure au taux normal peut masquer une véritable diminution de la glycémie chez un patient traité avec EXTRANEAL (Icodextrine), solution pour dialyse péritonéale et utilisant certains lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives. Ceci pourrait conduire au fait que le patient ou le professionnel de santé ne prenne pas les mesures appropriées pour ramener la glycémie à un niveau normal. Une lecture faussement élevée de la glycémie peut entraîner chez un patient l'administration d'insuline en quantité plus que nécessaire. Chacune de ces deux situations peut mener à des événements représentant un danger pour la vie du patient, comprenant perte de conscience, coma, dommages neurologiques ou décès.
3. Le service de dialyse péritonéale ou le patient devra entrer en contact avec le(s) fabricant(s) du lecteur de glycémie et/ou des bandelettes réactives pour savoir si le lecteur de glycémie ou les bandelettes réactives qu'ils emploient, sont concernés par l'interférence avec l'icodextrine ou le maltose, ou s'ils mesurent spécifiquement le glucose. En outre, consulter la notice du produit accompagnant le lecteur de glycémie et/ou les bandelettes réactives.
4. La liste suivante est fournie uniquement à titre informatif. Cette liste ne constitue pas une recommandation pour l'utilisation de ces lecteurs de glycémie ou des bandelettes réactives.
5. **ATTENTION**, seuls les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives spécifiques du glucose devront être employés chez les patients traités par EXTRANEAL (Icodextrine), solution pour dialyse péritonéale. Si vous employez des bandelettes différentes, veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier qu'elles sont spécifiques du glucose. La liste fournit les coordonnées des marques principales et les plus répandues des fabricants de lecteurs de glycémie et de bandelettes réactives.

LISTE DES LECTEURS DE GLYCEMIE
Mise à jour de Juillet 2019

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
<p>FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite FreeStyle Libre FreeStyle Libre Pro FreeStyle Optium Neo FreeStyle Optium Neo H FreeStyle Papillon Vision FreeStyle Precision Neo FreeStyle Precision Pro Optium Xido Neo Precision Xceed Pro</p>	<p>Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p>	<p align="center">Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Tel : +0800-10-11-56</p>
<p>Assure Platinum GLUCOCARD 01 GLUCOCARD 01-mini GLUCOCARD 01-mini plus GLUCOCARD G Black GLUCOCARD MX GLUCOCARD MyDIA GLUCOCARD S GLUCOCARD SM GLUCOCARD Vital GLUCOCARD X-meter GLUCOCARD X-mini GLUCOCARD X-mini plus GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime</p>	<p>Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p>	<p align="center">Arkray, Inc. www.arkray.co.jp ARKRAY France Tel : 0 800 50 30 33</p>
<p>Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Next One Blood Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour Plus One Blood Contour TS Contour USB Contour XT</p>	<p>Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p>	<p align="center">Ascensia Diabetes Care www.ascensia.com Tel : 0 800 34 22 38</p>

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
<p> OneTouch Select OneTouch Select Mini OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch SelectPlus Simple OneTouch Select Simple OneTouch Ultra OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraLink OneTouch UltraMini OneTouch UltraPlus Flex OneTouch UltraPlus Reflect OneTouch UltraSmart OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioSync OneTouch VerioVue OneTouch Verio Reflect </p>	<p> Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose. </p>	<p> Lifescan, Inc. www.lifescan.com Lifescan France Tel : 0 800 459 459 </p>
<p> Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter </p>	<p> Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose. </p>	<p> Nova Biomedical www.novabiomedical.com Nova Biomedical France Tel : 01 64 86 11 74 </p>
<p> Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus Accu-Chek Aviva Solo Accu-Chek Compact Plus Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Check Instant Accu-Check Instant S </p>	<p> Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose. </p>	<p> Roche Diagnostics www.accu-chek.com Roche France Tel : 0800 27 26 93 </p>

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
Accu-Chek Nano Accu-Chek Nano SmartView Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Nano Accu-Chek Performa Solo Accu-Chek Voicemate Plus System		

Veillez consulter attentivement les informations pour la prescription d'EXTRANEAL (Icodextrine), Solution pour Dialyse Péritonéale. Baxter et EXTRANEAL sont des marques déposées de Baxter International Inc. D'autres marques déposées ou produits cités ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.